

Link do produktu: <https://emedic.pl/irygator-do-nosa-pic-solution-rino-shower-p-129.html>



## Irygator do nosa PiC Solution Rino Shower

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena         | <b>35,90 zł</b>                                                                     |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>                                                                     |
| Czas wysyłki | <b>1 dzień</b>                                                                      |
| Producent    | <b>PiC Solution</b>                                                                 |
| CE           | <b>To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą</b> |

### Opis produktu

**Irygator / nebulizator do nosa **PiC Solution RINO SHOWER****

Najnowszy model mikronizującego irygatora PiC z miękkimi końcówkami donosowymi!  
Idealny do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej oraz zatok przynosowych

**Przeznaczony do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, nosogardzieli.  
Usuwa wydzieliny, śluz oraz katar**

Wytwarzane przez irygator Rino Shower cząsteczki posiadają średnicę odpowiednią dla górnych dróg oddechowych

Dla większej higieny i wygody terapii, posiada wbudowany pojemnik na wydzieliny.

- do oczyszczenia nozdrzy i usunięcia wydzielin przed terapią nebulizacyjną
- dla zwiększenia jej efektywności poprzez oczyszczenie górnych dróg oddechowych
- do terapii z dodatkiem zaleconego lekarstwa
- 2 miękkie końcówki (dla dorosłych i dzieci)
- higiena i wygoda - wbudowany pojemnik na wydzieliny
- pojemność zbiornika na roztwór do irygacji: 8 ml
- prosta obsługa jednym przyciskiem
- łatwe czyszczenie

#### **Sposób użycia:**

1. ściągnąć nasadkę donosową, wyciągnąć niebieski pojemnik
2. wlać sól fizjologiczną (max 8 ml)
3. włożyć niebieski pojemnik, założyć nasadkę donosową
4. podłączyć wężyk z inhalatora tłokowego i uruchomić kompresor
5. zbliżyć pojemnik do nosa
6. uruchomić irygację zatykając palcem otwór w obudowie irygatora

**Uwaga: Rino Shower współpracuje z inhalatorem tłokowym, nie pracuje samodzielnie**

- 
- Irygator **PiC Solution Rino Shower**
  - Instrukcje obsługi w języku polskim
  - Gwarancja
  - Dowód zakupu: paragon lub faktura VAT

Gwarancja: 2 lata