

Link do produktu: <https://emedic.pl/urzadzenie-do-treningu-wydechu-philips-threshold-peg-p-116.html>



Urządzenie do treningu wydechu Philips Threshold PEP

Cena	119,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	0383730001043
Producent	Philips Respironics
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Urządzenie do treningu wydechu Philips Respironics Threshold PEP

Positive Expiratory Pressure - **Threshold PEP Philips Respironics gwarantuje stały wysiłek treningowy, który zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni wydechowych poprzez wytwarzanie odruchu warunkowego, dzięki czemu w płucach wytwarzane jest ciśnienie, które pomaga otworzyć drogi oddechowe i tym samym ułatwia nam wykrztuszenie zalegającej wydzieliny**

- Jednokierunkowy zawór zapewnia stały opór podczas wydechu, aż do momentu kiedy nie zostanie wytworzone odpowiednie ciśnienie. Powietrze będzie przepływało przez urządzenie do momentu wytworzenia przez pacjenta odpowiedniego ciśnienia progowego, potrzebnego do pokonania oporu sprężyny
- Ciśnienie może być odpowiednio regulowane, tak aby ćwiczenia były wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza
- Threshold PEP powinien być stosowany pod kontrolą lekarską - dotyczy to szczególnie osób z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego
- **Kto powinien używać Threshold PEP?** Pacjenci z dużą ilością wydzieliny w płucach i trudnościami z ich oczyszczaniem. Nadmierne wytwarzanie śluzu prowadzi do nawrotu zakażenia i uszkodzenia tkanek w płucach
- **Zalecany przy:** astmie, mukowiscydozie, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, POChP (przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc)
- **Prosty w obsłudze:** urządzenie posiada możliwość indywidualnego dostosowania oporu wydechowego w granicach 7-41 cm H₂O i jest łatwe w obsłudze niezależnie od wieku pacjenta.

Jak użyć Philips PEP Threshold:

Zalety:

- Jednokierunkowy zawór niezależny od przepływu zapewnia stały opór
- Wzmacnia siłę i wytrzymałość mięśni oddechowych
- Regulowane ustawienie
- Łatwy czyszczeniu
- Wygodny w użyciu
- Czytelna skala na urządzeniu

- Dokładność: +/- 1 cm H₂O
- Długość: ok. 11,5 cm
- Średnica: ok. 4 cm
- Zakres pomiarowy: 5-20 cm H₂O

- **Trenażer wydechu Philips Respironics Threshold PEP**
- Ustnik
- Zatyczka na nos
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu: paragon lub faktura VAT